



# Huiles de Silicone GEL

Tube de 15 g

# زيوت السيليكون هلام

أنبوب 15 غ



**GEMME Huiles de Silicone** est un gel composé d'huiles de silicones, non collant et qui sèche rapidement. Il aide à atténuer les cicatrices récentes ou pré-existantes.

**GEMME Huiles de Silicone** peut être utilisé sur toutes les surfaces du corps, y compris le visage et le cou.

Il est facile et indolore à l'application, aucun retrait de produit n'est nécessaire.

Lorsque l'utilisation de **GEMME Huiles de Silicone** se fait selon les instructions, le gel sèche en formant une couche transparente, imperméable à l'eau et protectrice durant 24 heures.

Le Gel aide à la guérison des surfaces cutanées endommagées en ramollissant et hydratant la peau, tout en aplatissant les cicatrices en relief.

Il aide par conséquent à prévenir le développement des marques de cicatrices sur la peau.

**GEMME Huiles de Silicone** protège les plaies des attaques microbiennes ou de substances chimiques, ce qui permet d'éviter les irritations et macération de la peau, aidant ainsi à la guérison naturelle de la plaie sans laisser de cicatrices bien apparentes.

**GEMME Huiles de Silicone** aide à soulager les démangeaisons et l'inconfort associés aux cicatrices, et réduit également rougeur et décoloration de la peau.

Les types de cicatrices pour lesquelles **GEMME Huiles de Silicone** peut être utilisé sont des cicatrices résultantes de plaies de la chirurgie générale, plaies chroniques, brûlures, acné ou toutes autres maladies de la peau.

**GEMME Huiles de Silicone** convient à tous, y compris les enfants et les personnes à peau sensible.

## Conseils d'utilisation :

Laver la zone affectée puis la sécher.

Appliquer soigneusement une petite quantité et masser délicatement puis essuyer l'excès jusqu'à ce que la peau ne colle plus.

Appliquer deux fois par jour le matin et au coucher.

**Composition :** Diméthicone, Dimethiconol, Cyclopentasiloxane, Diméthicone Cétilylique.

## Précaution d'emploi :

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Uniquement pour usage externe.
- Éviter le contact avec les yeux.
- Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes.
- Ne pas utiliser si le couvercle ou le tube sont abîmés ou endommagés.

**Conservation :** À conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

أنواع الندوب التي يمكن أن يستخدم لها **جيم هلام زيوت السيليكون** هي الندوب الناتجة عن: الجروح بعد الجراحة العامة، الجروح المزمنة، الحروق، حب الشباب وغيرها من الأمراض الجلدية.

يمكن استخدام **جيم هلام زيوت السيليكون** لدى جميع الناس، بما في ذلك الأطفال والأشخاص ذوي البشرة الحساسة.

## نصائح الاستعمال:

اغسل المنطقة المصابة وجفها. طبّق بعناية كمية صغيرة من الهلام على الندب وقم بالتدليك برفق، ثم امسح الكمية الزائدة حتى تصبح البشرة لا تلتصق عند لمسها. يطبّق مرتين في اليوم في الصباح وعند النوم.

**المكونات:** ثنائي الميثيكون، ديميثيكونول، سيكلوبنتاسيلوكسان، سبتيل ثنائي الميثيكون.

## احتياطات الاستعمال:

- يترك بعيداً عن متناول الأطفال.
- فقط للإستعمال الخارجي.
- تجنب ملامسة العينين.
- لا يستعمل على الجروح المفتوحة.
- لا يستعمل إذا كان الغطاء أو الفارورة متلفين.

**الحفظ:** يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 30 °م.

**جيم هلام زيوت السيليكون** هو هلام مكون من زيوت السيليكون، غير لاصق وسريع الجفاف. يساعد على تقليل الندوب الحديثة أو الموجودة مسبقاً.

يمكن استخدام **جيم هلام زيوت السيليكون** على جميع مساحات الجسم، بما في ذلك الوجه والرقبة.

يتم تطبيقه بسهولة، وبدون ألم، كما أنه لا يستلزم إزالة المنتج بعد ذلك.

عند استخدام **جيم هلام زيوت السيليكون** وفقاً للتعليمات، فإنه يجف بتشكيل طبقة شفافة، عازلة للماء وواقية لمدة 24 ساعة.

يساعد الهلام على شفاء مساحات البشرة المتضررة من خلال تليين وترطيب البشرة، مع تسطيح الندوب الناتجة، وبالتالي فإنه يساعد على منع تطور علامات الندوب على الجلد.

يحمي **جيم هلام زيوت السيليكون** الجروح من هجمات الجراثيم أو المواد الكيميائية، مما يساعد على منع تهيج الجلد وتعطيته، وبالتالي يساعد على التئام الجروح بشكل طبيعي دون ترك ندوب واضحة.

يساعد **جيم هلام زيوت السيليكون** على التخفيف من الحكّة والإزعاج المرتبطين بالندوب، كما يقلل أيضاً من احمرار الجلد وفقدان لونه الطبيعي.

منتج من طرف شركة سنا للأبحاث الصيدلانية، عمان، الأردن ومعياً من طرف ش.ذ.م.م. أونيكس للصناعة الصيدلية الكائنة بمنطقة النشاطات

التجارية زريز، ولاية الطارف، الجزائر.

**قرار رقم :** 318 بتاريخ : 2019/12/11.

Fabriqué par SANA Pharmaceutical Research, Amman, Jordanie et conditionné par Sarl ONYX Industrie Pharmaceutique sise à la Zone d'Activité Commerciale, Zéizer, W. El-Tarf, Algérie.

**Décision n° :** 318 du 11/12/2019.

تجدون آخر مراجعة لهذه النشرة من خلال مسح هذا الرمز



retrouvez la dernière révision de cette notice en scannant ce code